

# ▼ **BENEPALI<sup>®</sup> PEN**

**SNELGIDS**

---

**Benepali<sup>®</sup> pen  
auto-injector**

 **Benepali<sup>®</sup>**

(PFPen) NL v2.0  
Goedgekeurd: 04/2019

# Hier beginnen

# Benepali® injecteren met de Benepali® pen

Deze handleiding is ontworpen als snelle referentie voor hoe u op een veilige en effectieve manier kunt injecteren.

Vóór het injecteren van Benepali® verwijzen we u naar de **gebruiksaanwijzing** en de **bijsluiter** voor belangrijke informatie die u moet onthouden. Dit omvat informatie over mogelijke allergische reacties, bijwerkingen en omstandigheden waaronder Benepali® niet mag worden gebruikt.

(PPen) NL V2.0

De Benepali® pen hoeft u alleen maar in te drukken, er is **geen knop om te bedienen**, waardoor het **gemakkelijker** is op de juiste manier te injecteren. **Hij is compact en lichtgewicht**; de **knoploze auto-injector** voor etanercept van Biogen. Etanercept is het actieve bestanddeel in Benepali®.

## → Het voorbereiden op de injectie


### Verzamel uw benodigdheden

**Zoek een schoon, goed verlicht oppervlak en leg het volgende klaar:**



De verpakking bevat niet:

**Een nieuwe, vooraf gevulde Benepali® pen auto-injector** (verwijder uit de verpakking die in de koelkast wordt bewaard)

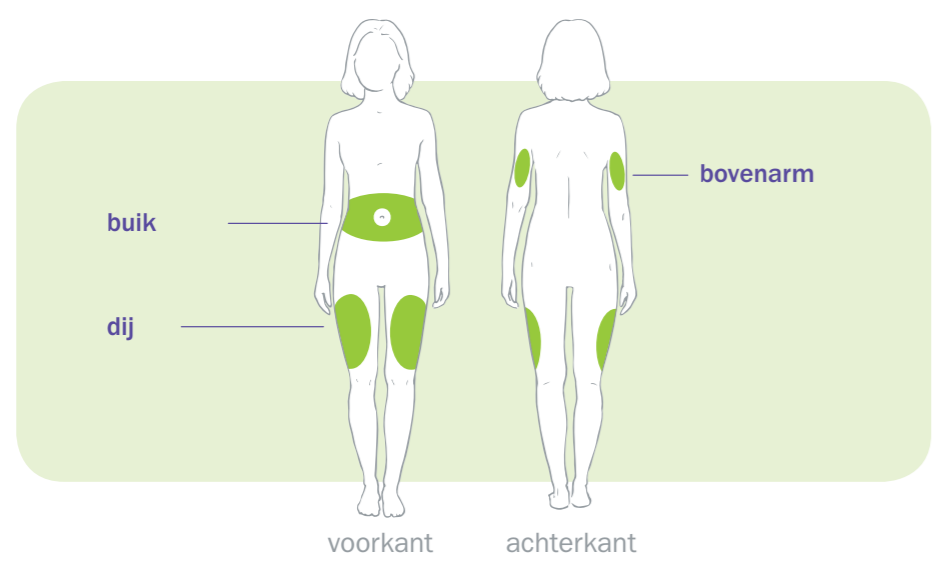

### Inspecteer zorgvuldig

#### Controleer de Benepali® pen

Gebruik de pen **niet** na de **uiterste houdbaarheidsdatum**.

Gebruik de pen **niet** als deze op een hard oppervlak is gevallen. Er kunnen interne onderdelen zijn gebroken.

De pen **niet** schudden.

Gebruik de pen niet als de **blauwe naalddop** niet stevig is bevestigd.

#### Inspecteer het medicijn

Kijk door het **controlevenster**. De oplossing moet helder of licht melkachtig, kleurloos of lichtgeel zijn, en kan kleine witte of bijna doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten.

Gebruik de oplossing **niet** als deze verkleurd of troebel is, of als er andere deeltjes aanwezig zijn dan hierboven wordt beschreven.

### Laat het medicijn op kamertemperatuur komen

#### 30 minuten wachten

Laat de Benepali® pen gedurende ten minste 30 minuten op kamertemperatuur komen. Dit maakt het gemakkelijker en comfortabeler om het medicijn te injecteren.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik **geen** warmtebronnen, zoals een magnetron of heet water, om het medicijn op te warmen.

Verwijder de blauwe naalddop **niet**.



**Wacht 30 minuten alvorens het medicijn te gebruiken**

### Kies uw injectieplaats

#### Kiezen waar u gaat injecteren

De Benepali® pen is bedoeld voor subcutane injectie. Het medicijn moet worden geïnjecteerd in de dij, buik (op ten minste 5 cm afstand van de navel), of achterkant van de bovenarm.

Wissel bij elke injectie van injectieplaats.

Injecteer **niet** in gebieden die rood, hard, gekneusd of gevoelig zijn, of in littekens of striae.

Als u psoriasis hebt, injecteer dan **niet** in verheven, dikke, rode of schilferige huidplekken of laesies.


## → Injecteren met de Benepali® pen



**Was uw handen**  
Gebruik water en zeep.



**Injectieplaats reinigen**  
Veeg over de injectieplaats met een alcoholgaasje.  
Raak dit gebied **niet** meer aan vóór het zetten van de injectie.

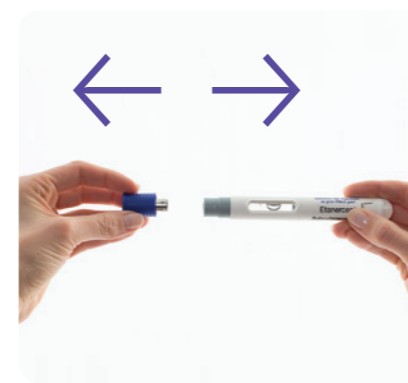

#### Verwijder de naalddop

Trek de blauwe naalddop recht van de pen af.

Draai of buig de blauwe naalddop **niet** terwijl u hem verwijdert, omdat dit de naald kan beschadigen.

De dop nooit terug op de naald plaatsen.

Gooi de dop weg in een afvalcontainer voor scherpe materialen.



#### Rek de huid uit, plaats de pen

Rek de huid zachtjes uit op de injectieplaats.

Houd de Benepali® pen in een hoek van ongeveer **90 graden** met de huid.

Knijp **niet** in de huid.

U moet 2 klikken horen terwijl u drukt



#### Druk stevig om te beginnen

Pak de Benepali® pen stevig beet en druk naar beneden op de injectieplaats om de injectie te starten (er is geen knop om op te drukken).

De pen laat een **eerste klik** horen als de injectie begint – til de pen nog niet op.

**Blijf** de pen **stevig** op de injectieplaats **drukken**.

U moet een **tweede klik** horen.

Blijf 15 sec indrukken



#### Tel tot 15 na de tweede klik

Na de **tweede klik** telt u **langzaam tot 15** terwijl u op de injectieplaats blijft drukken om de injectie goed af te ronden.

De druk op de injectieplaats **niet** verminderen of de Benepali® pen verplaatsen totdat de injectie volledig is voltooid is.

Controleer de gele zuiger



#### Verwijderen en bevestigen

Til de lege pen van de huid af.

De naaldbeschermer bedekt nu de volledige naald.

**Controleer** dat de gele zuigerstaaf in het controlevenster te zien is, om te bevestigen dat de volledige dosis is toegediend.

## Na de injectie



#### Gooi de pen op de juiste manier weg

Gooi de lege Benepali® pen weg in een goedgekeurde afvalcontainer voor scherpe materialen. Vraag uw zorgverlener hoe u het beste een volle afvalcontainer voor scherpe materialen kunt afvoeren.

Gooi de afvalcontainer voor scherpe materialen **niet** weg bij het huishoudelijk afval of de recycling.

Bewaar de container altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.

#### Controleer de injectieplaats

Als er op de injectieplaats een bloeding optreedt, druk dan op de injectieplaats met een wattenbol of gaasje op de injectieplaats.

Wrijf **niet** over de injectieplaats.

Indien nodig kunt u de injectieplaats met een pleister bedekken.



#### Vragen?

Overleg met uw arts of verpleegkundige.

Raadpleeg uw **gebruiksaanwijzing**.

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door elke bijwerking die u ondervindt te melden. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden ([www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staat vermeld op de verpakking en in de bijsluiter.

Lees de **gebruiksaanwijzing** die bij Benepali® wordt verstrekt volledig door voordat u de Benepali® pen gebruikt en elke keer dat u uw recept hernieuwt, aangezien er nieuwe informatie beschikbaar kan zijn. Deze **snelgids** is niet bedoeld om deze instructies te vervangen.

**Probeer niet** uzelf te injecteren tenzij uw arts of verpleegkundige u heeft laten zien hoe u de injectie moet uitvoeren.

(PFPen) NL v2.0  
Goedgekeurd: 04/2019

